

TERUMO®

人にやさしい医療へ



「幸福」を願う、緑の小春。

3L器  
酸素濃縮装置

オーツ  
O<sub>2</sub>グリーン

小春®

## 部屋で

### 室内でも場所を取らない コンパクトサイズ

コンパクトサイズの「O<sub>2</sub>グリーン小春3」は、特別に設置場所をつくらなくてもOK。置き場所も容易に変えられます。



## 緊急時

### 内蔵バッテリーで停電時も安心

自動充電機能<sup>※1</sup>と自動切替運転により、不意の停電や災害時の備えも万全です。コンセントのない場所でも内蔵バッテリーにより約2.5時間使用可能。さらに別売品の外部バッテリー併用で約6時間<sup>※2</sup>使用できます。

### 同調機能搭載

同調モードでバッテリーの消費を節約(0.75L/分以上使用時)。また、流量は最大5L/分まで出力可能となります。



※1 AC電源使用時  
※2 流量0.5L/分、新品満充電時・25℃



## 患者さまに、より快適で 幸福なHOT生活を送っていただくために。



部屋で過ごすとき。どこかへ移動するとき。

さらには、停電などの緊急のとき。

新しい「小春」の開発は、

患者さまの様々な生活シーンを考え、

ニーズを捕えることからスタートしました。

そして、その答えとして生まれたのが「小春3」。

軽量・コンパクトサイズでありながら、

流量は余裕の3L。安心機能も充実させました。

まるで、いっしょに暮らすペットのように。

「小春3」は、患者さまの毎日の暮らしに寄り添います。



移動しやすい把手

電気代1日約29円

電気代を1kwhあたり22円として、1L/分で24時間使用した場合。

専用ACアダプタ付台車

キャスター付

## 移動時

### 軽量13.5kgで、 移動・外出もOK

軽量13.5kgの「O<sub>2</sub>グリーン小春3」なら、持ち運びもより手軽に。旅行先、外出先、またデイサービスへも車でラクに運べます。

※弊社、従来型3L/分器のおよそ1/3の重さです。(テルモ調べ)



## 安心感

### 音声ガイダンス/ 大きなLED表示/警報機能

操作や各種の警報を音声でお知らせ。大きく見やすいLED表示で安心機能も充実です。



## サポート

## 機器開発から保守管理まで、 一貫したサポート体制

テルモの「ホームジョイント」は、在宅医療に欠かせない医療機器の「手配」、「設置」、「メンテナンス」等をトータルに支援するシステムです。設置後の機器のトラブルに対しても、フリーダイヤルによる24時間の電話受付を行っており、患者さまも安心してご利用いただけます。



テルモメディカル  
プラネックス  
●在宅医療研修



人間工学ラボ  
●人間工学検証  
●ユーザビリティテスト

### <操作部>



### <仕様>

コード番号	ZS-IT3H	使用条件	周囲温度10~40℃ 相対湿度30~75%(結露のないこと)
寸法	高さ545×幅350×奥行250mm	酸素濃度	設定流量 2.50L/分以下で酸素濃度92±3% 設定流量 3.00L/分以上で酸素濃度91±3%
重量	13.5kg	酸素流量 (L/分)	【連続】0.25/0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 【同調】0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00/4.00/5.00
電源	AC100V(50Hzまたは60Hz)	警報	【電源供給停止】点検ランプと音によりお知らせ 【装置異常】【流量異常】【圧力】点検ランプと音によりお知らせし、装置が停止 【酸素濃度低下】酸素ランプと点検ランプと音によりお知らせ 【無呼吸】酸素ランプと音によりお知らせ 【バッテリー残量】バッテリー残量モニタの点灯と音によりお知らせ 【チューブ折れ】酸素ランプと音によりお知らせ
消費電力	3.00L/分…145W 2.50L/分…135W 1.75~2.00L/分…90W 1.25~1.50L/分…75W 0.75~1.00L/分…55W 0.25~0.50L/分…45W 【内蔵バッテリー使用時】電圧 DC25.9V 連続使用時間 約40分(3L/分)~2.5時間(0.5L/分) (新品満充電時、25℃にて測定)		
電撃に対する保護	クラスIIおよび内部電源機器B形装着部		
運転音 (無響音室平均)	酸素流量 3.00L/分:34dB(A) 酸素流量 2.00L/分:29dB(A) 酸素流量 1.00L/分:25dB(A)		

改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。



販売:テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 <http://www.terumo.co.jp/>

製造販売業者:株式会社 医器研 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-12-27

販売名:O<sub>2</sub>グリーン 小春3 医療機器認証番号:219AGBZX00035 特定保守管理医療機器

©、TERUMO、テルモ、ホームジョイント、O<sub>2</sub>グリーン小春、テルモメディカルプラネックスはテルモ株式会社の登録商標です。 ©テルモ株式会社2007年6月 07T279-1LL30MM0706



酸素配合率100%再生酸素を使用しています。